

thermosept® RKF

Alkalischer Reiniger für die maschinelle Aufbereitung von medizinischen Instrumenten und Laborutensilien.



Vorteile

- tensid- und phosphatfrei
- sehr gute Reinigungsleistung
- schaumarm
- sehr gute, rückstandsfreie Abspülbarkeit

Anwendungsgebiete

thermosept® RKF ist geeignet für die effektive, alkalische Reinigung von z.B. chirurgischen und mikrochirurgischen Instrumenten, Anästhesiematerial, Babyflaschen, Laborglas und stark verschmutzten Laborutensilien. thermosept® RKF ist tensidfrei und hat ein gutes Abspülverhalten. Der Reiniger kann für die maschinelle Aufbereitung von medizinischen Materialien und Materialien auch aus dem Laborbereich wie Edelstahl, Glas, Keramik und diversen Kunststoffen verwendet werden. Nur für alkalibeständige Materialien geeignet. Alternativ kann für alkaliempfindliches Spülgut der Neutralreiniger thermosept® ER oder der mildalkalische Reiniger thermosept® X-tra verwendet werden. thermosept® RKF ist für den Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten sowie Taktbandanlagen geeignet.

Anwendungshinweise

Dosierung

0,3 - 1 % (3 - 10 ml/l), Standarddosierung ca. 0,5 %
Reinigungstemperatur ca. 40 - 60 °C; Reinigungsdauer ca. 3 -10 min. Die Programmeinstellungen sind abhängig vom Grad der Verschmutzung und dem Spülgut und können je nach individuellen Gegebenheiten abweichen. Für die Reinigung und die nachfolgenden Programmschritte, vor allem für die Schlusspülung, wird die Verwendung von vollentsalztem Wasser (VE-Wasser) empfohlen. Zur Neutralisation nach der alkalischen Reinigung empfiehlt sich der Einsatz von

thermosept® NKZ. Bitte beachten Sie die Empfehlungen der Geräte- und Instrumentenhersteller.



Produktdaten

Zusammensetzung:

Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: < 5 % Phosphonate.

Enthält Kaliumhydroxid.

Weitere Inhaltsstoffe: Korrosionsinhibitoren.

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	1,12 - 1,13 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos - gelb
Flammpunkt	> 100 °C / Methode : ISO 2719
Form	flüssig
pH	14 / 100 % / 20 °C
Viskosität, dynamisch	ca. 3 mPa*s / Methode : ISO 3219

Besondere Hinweise

Nur für die Aufbereitung von alkaliebeständigen Materialien verwenden..

Bestellinformationen

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
thermosept RKF 5 kg KA	1 / Kanister	SM00146305

Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Kanisterhahn für 5 l / 10 l	SM00135502
Kanisterschlüssel für 5 + 10 l	SM00135810
Umfülltrichter	SM00117901
schülke Kanisterdosierer 5 l / 10 l (20 ml / Hub)	SM00117101

Verwandte Produkte

- thermosept® NKP
- thermosept® NKZ

Umweltinformation

Der Hersteller schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Kontaktinformationen

Für individuelle Fragen:
Telefon: +41 62 748 49 39
E-Mail: info@sanaclean.ch

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com / www.sanaclean.ch