

thermosept® SKS

Saurer Enthärter für die thermische Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen.



Vorteile

- verhindert den Aufbau von Kalkbelägen
- unterstützt eine rückstandsfreie Abtrocknung des Spülgutes
- schaumfrei, enthält keine Tenside
- besonders umweltschonend
- hohe Material verträglichkeit bei Edelstahl und diversen Kunststoffen

Anwendungsgebiete

thermosept® SKS ist geeignet für die Verwendung zur thermischen Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen. thermosept® SKS verfügt über spezielle Enthärterkomponenten zur Abbindung der Wasserhärte und sorgt für eine fleckenfreie Abtrocknung des Spülgutes. Das Produkt ist schaumfrei und bei allen Wasserhärten verwendbar.

Anwendungshinweise

Dosierung

0,01 % pro 1° dH, das entspricht einer Dosierung von 0,1 - 0,3 %, (1 - 3 g/l Wasser).

Die Dosierung erfolgt über maschineneigene Dosierpumpen, diese sind auf Säurebeständigkeit zu prüfen. Sollte eine starke Verkalkung des Heizstabes festgestellt worden sein, empfiehlt es sich, vor Einsatz von thermosept® SKS eine Entkalkung vorzunehmen (z.B. mit thermosept® NKZ oder thermosept® NKP). thermosept® SKS verhindert auch bei hartem Wasser bzw. hoher Wasserhärte Kalkablagerungen im Verdampfer.



Produktdaten

Zusammensetzung:
organische Säuren, Härtestabilisator, Korrosionsinhibitoren.

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,08 g/cm ³ / 20 °
Farbe	farblos
Flammpunkt	> 100 °C
Form	flüssig
Viskosität, dynamisch	Keine Daten verfügbar Bestellinformation

Bestellinformationen

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
thermosept SKS SOKA 5 kg KA	1 / Kanister	SM00145803
thermosept SKS 5 kg KA	1 / Kanister	SM00145806

Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Kanisterhahn für 5 l / 10 l	SM00135501
Kanisterschlüssel für 5 + 10 l neutr.	SM00135810



Umweltinformation

Der Hersteller schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Kontaktinformationen

Für individuelle Fragen:
Telefon: +41 62 748 49 39
E-Mail: info@sanaclean.ch

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com / www.sanaclean.ch



SanaClean AG

Altshoferstrasse 5
CH-6252 Dagmersellen

Tel. +41 62 748 49 39
E-Mail: info@sanaclean.ch