

thermodent® neutralizer

Neutralisator für die maschinelle Aufbereitung im zahnmedizinischen Bereich.



Vorteile

- beugt Ablagerungen und Belagsbildungen auf Instrumenten und Geräten vor
- sehr schonend auf Basis von Zitronensäure
- neutralisiert alkalische Rückstände aus dem Reinigungsschritt

Anwendungsgebiete

Zur maschinellen Neutralisation von zahnärztlichem Instrumentarium nach alkalischer Reinigung (thermodent® powder, thermodent® alka clean). Beugt der Bildung von Ablagerungen an Instrumenten und Geräten vor und optimiert das Reinigungsergebnis. Besonders gut materialverträglich auf Basis von Zitronensäure. Sehr wirtschaftlich, da nur geringe Dosiermenge notwendig. Verwendbar in allen gängigen Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG).

Anwendungshinweise

Die Anwendungskonzentration beträgt ca. 0,1 - 0,2 % (1 - 2 ml/l). Beachten Sie Hinweise der Geräte und Instrumentenhersteller.



Produktdaten

Zusammensetzung:

Zitronensäure

Chemisch-physikalische Daten

Dichte ca. 1,17 g/cm³ / 20 °C

Farbe farblos

Chemisch-physikalische Daten

Flammpunkt nicht anwendbar

Form flüssig

pH 2 / 100 % / 20 °C

Viskosität, dynamisch ca. 4 mPa*s / Methode : ISO 3219

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
thermodent neutralizer 5 l KA	1/Kanister	SM00143305

Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Kanisterhahn für 5/10 l	SM00135501
Kanisterschlüssel für 5/10 l neutr.	SM00135810

Umweltinformation

Der Hersteller schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.



Kontaktinformationen

Für individuelle Fragen:

Telefon: +41 62 748 49 39

E-Mail: info@sanaclean.ch

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet
unter www.schuelke.com / www.sanaclean.ch



SanaClean AG

Bettenweg 12
CH-6233 Büren

Tel. +41 62 748 49 39
E-Mail: info@sanaclean.ch